
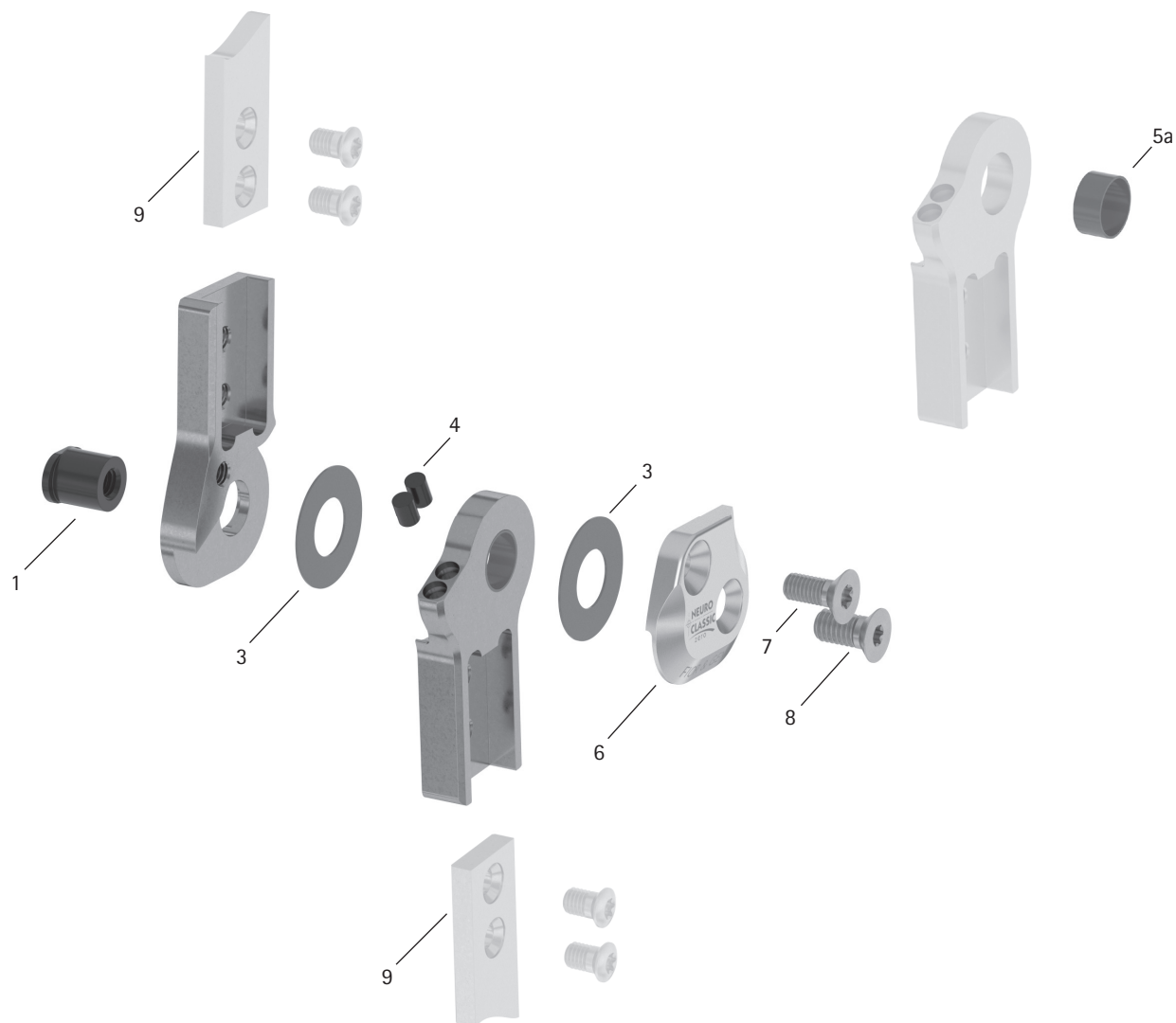


Patientenkommission/Konfigurations-ID \_\_\_\_\_

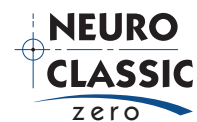

Pos.	12 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Überprüfung/ ggf. Austausch	Spätester Austausch nach
<b>Systemgelenk</b>						
1	SB7049-L0590	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS1609-040	Gleitscheibe, Ø = 16 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS1609-045					
3	GS1609-050					
3	GS1609-055					
3	GS1609-060					
4	PN1000-L05/5	Extensionsanschlagdämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5a	BP1009-L050	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SJ0151-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SJ0151-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
7	SC1404-L08	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1404-L08	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)			alle 6 Monate	36 Monaten
<b>Systemanker und Systemschienen</b>						
9	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	-

WP0070-DE-2021-12