


Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

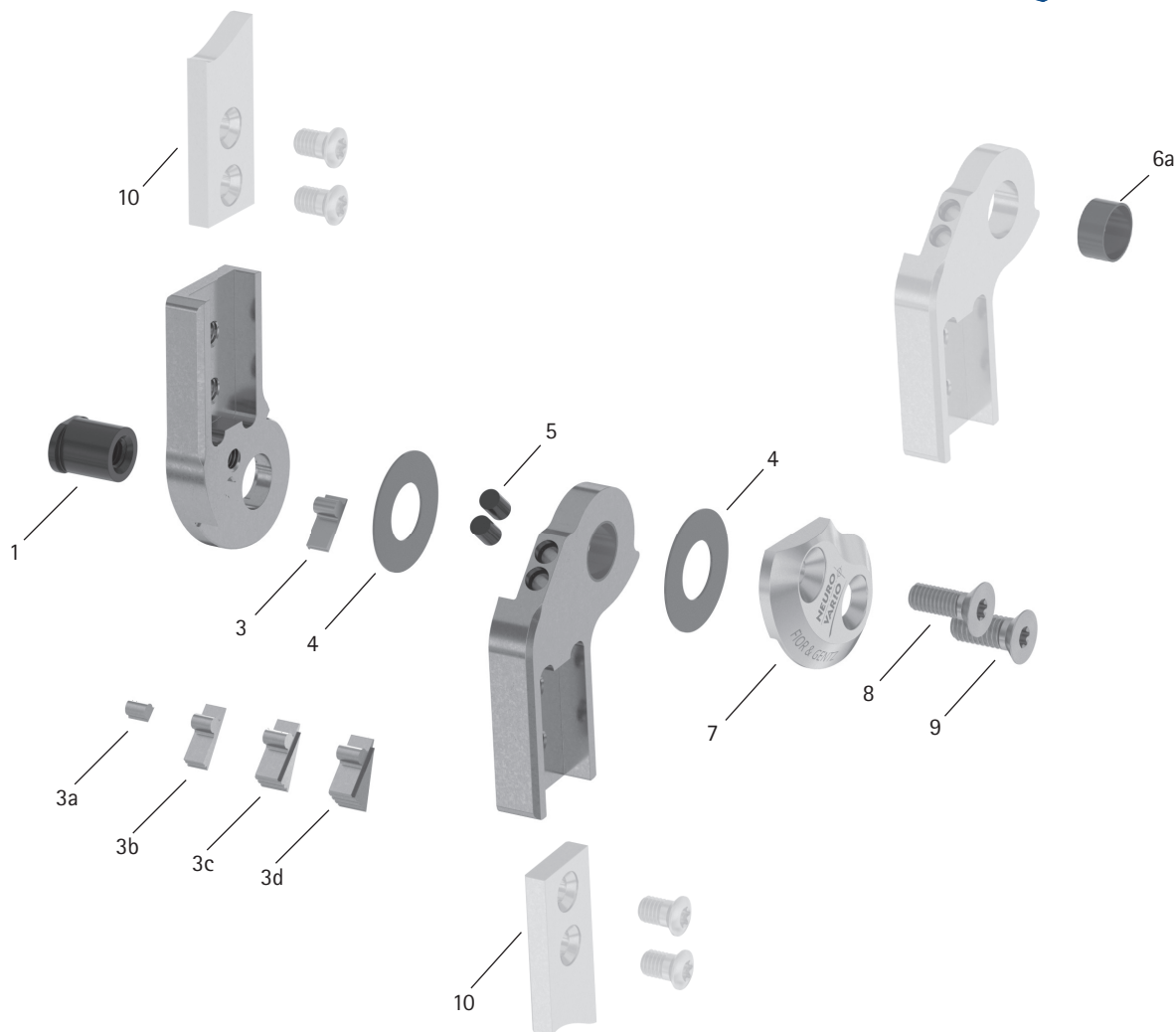

Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Überprüfung/ ggf. Austausch	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB1069-L1060	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3a	SJ9023-E000	0° Extensionsanschlag	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	-
3	SK9523-E005	5° Extensionsanschlag				
3b	SK9523-E010	10° Extensionsanschlag				
3c	SK9523-E020	20° Extensionsanschlag				
3d	SK9523-E030	30° Extensionsanschlag				
4	GS2311-040	Gleitscheibe, Ø = 23 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS2311-045					
4	GS2311-050					
4	GS2311-055					
4	GS2311-060					
5	PN1000-L05/5	Extensionsanschlagdämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6a	BP1211-L055	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SK0193-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
7	SK0193-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium				
8	SC1405-L14	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
9	SC1406-L14	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)			alle 6 Monate	36 Monaten
Systemanker und Systemschienen						
10	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	-

WP0079-DE-2021-12