


Commission des patients/ID de configuration _____

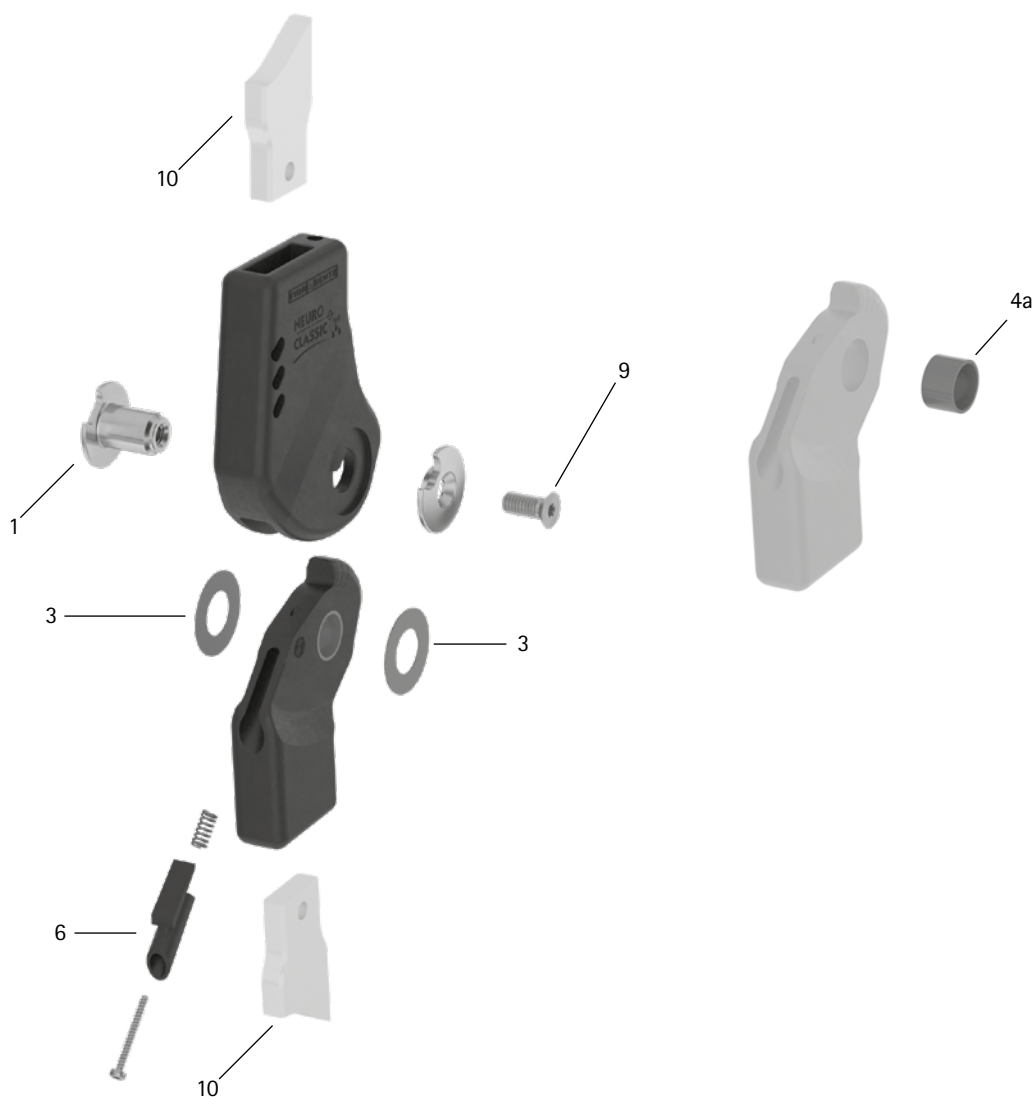

Pos.	16 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/ remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
Articulation modulaire						
1	SK0893-1/C	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	GS2311-040	rondelle de friction, Ø = 23 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS2311-045					
3	GS2311-050					
3	GS2311-055					
3	GS2311-060					
4 a	BP1211-L077	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6	SK9803-E005/C	butée d'extension de 5°	usure	remplacer	tous les 6 mois	-
9	SC1405-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
Ancre modulaire et montants modulaires						
10	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	-

WFO122-FR-2022-06