



Pos.	10 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/ remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
Articulation modulaire						
1	SB6039-L0480	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	GS1206-040	rondelle de friction, Ø = 12 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS1206-045					
3	GS1206-050					
3	GS1206-055					
3	GS1206-060					
4	SF0160-AL	plaque supérieure	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	SC1403-L08	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SC1403-L08	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)			tous les 6 mois	36 mois
Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires						
7	BP0706-L020	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
8	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
9	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	-