


Commission des patients/ID de configuration _____

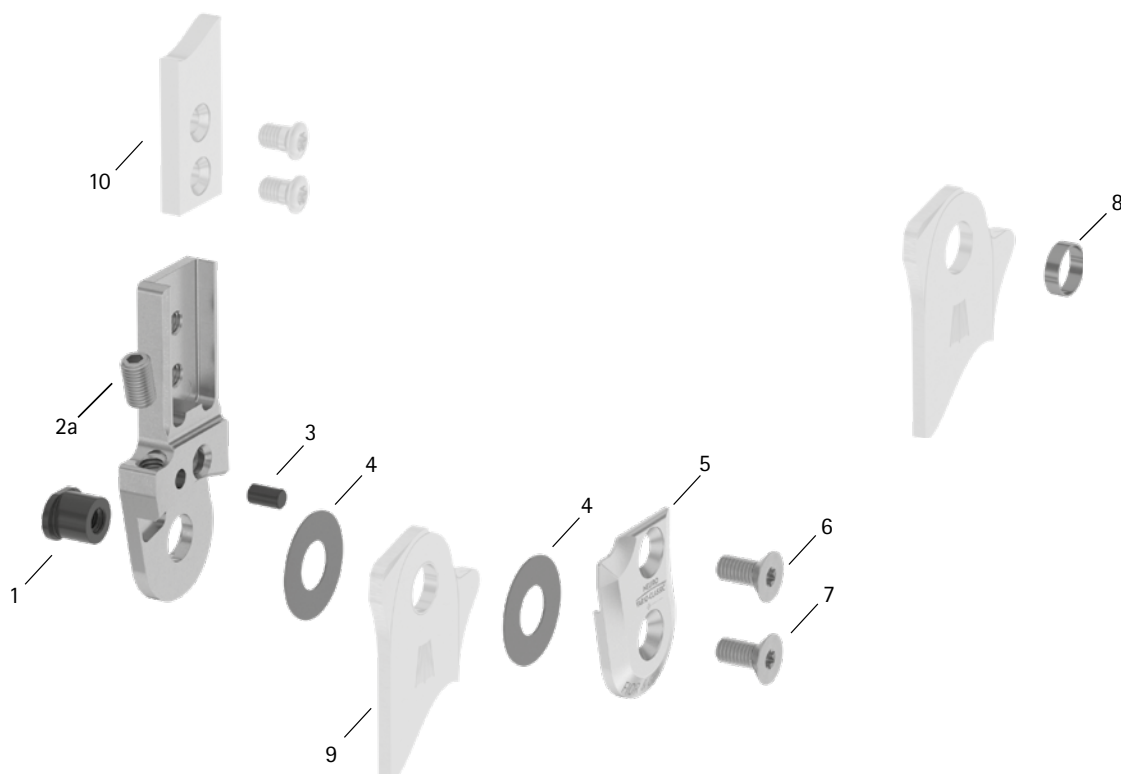

Pos.	14 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/ remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
Articulation modulaire						
1	SB8559-L0620	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
2a	SC9605-L08ST	vis de réglage	usure	remplacer	tous les 6 mois	-
3	GS4007	goupille de sécurité	usure	remplacer	tous les 6 mois	-
4	GS2009-040	rondelle de friction, Ø = 20 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS2009-045					
4	GS2009-050					
4	GS2009-055					
4	GS2009-060					
5	SH0262-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	SH0262-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite				
6	SC1405-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SC1405-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires						
8	BR1009-L025	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
10	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	-