



Pos.	16 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/ remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
<b>Articulation modulaire</b>						
1	SB9669-L0710	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	GS2210-040	rondelle de friction, Ø = 22 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS2210-045					
3	GS2210-050					
3	GS2210-055					
3	GS2210-060					
4	SF0163-AL	plaque supérieure	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)				
<b>Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires</b>						
7	BR1110-L030	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
8	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
9	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	-