



Pos.	16 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
Articulation modulaire						
1	SB9669-L0760	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
2a	SC9606-L10ST	vis de réglage	usure	remplacer	tous les 6 mois	-
3	GS4007	goupille de sécurité	usure	remplacer	tous les 6 mois	-
4	GS2210-040	rondelle de friction, Ø = 22 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS2210-045					
4	GS2210-050					
4	GS2210-055					
4	GS2210-060					
5	SF0263-AL	plaque supérieure	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SC1405-L11	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires						
8	BR1110-L030	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
10	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	-