



Pos.	10 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Überprüfung/ ggf. Austausch	Spätester Austausch nach
<b>Systemgelenk</b>						
1	SB6039-L0580	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0390-01	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
4	GS1206-040	Gleitscheibe, Ø = 12 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS1206-045					
4	GS1206-050					
4	GS1206-055					
4	GS1206-060					
5	SF0660-AL	Deckplatte	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6a	VE3771-04/10	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6c	FE1615-01	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6d	GS0604-350	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6e	PN0003-L02	Anschlagdämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6g	SH0490-01	Kolben	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	-
7	SC1403-L08	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1403-L08	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)			alle 6 Monate	36 Monaten
<b>Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen</b>						
9	BP0706-L020	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
11	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	-