



Pos.	12 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/ remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
<b>Articulation modulaire</b>						
1	SB7049-L0590	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0391-01	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
4	GS1407-040	rondelle de friction, Ø = 14 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS1407-045					
4	GS1407-050					
4	GS1407-055					
4	GS1407-060					
5	SF0661-AL	plaque supérieure	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6a	VE3771-050/10	joint torique pour la fixation de la vis de réglage sur orthèse	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6c	FE1611-01	ressort de pression	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6d	GS0705-525	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6e	PN0004-L02	amortisseur de butée	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6g	SH0491-01	piston	usure	remplacer	tous les 6 mois	-
7	SC1404-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SC1404-L10	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)			tous les 6 mois	36 mois
<b>Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires</b>						
9	BR0807-L020	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
11	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	-