



Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Überprüfung/ ggf. Austausch	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB8559-L0630	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0392-02	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
4	GS2009-040	Gleitscheibe, $\varnothing = 14$ mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS2009-045					
4	GS2009-050					
4	GS2009-055					
4	GS2009-060					
5	SF0662-AL	Deckplatte	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6a	VE3771-08/15	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6c	FE1916-01	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6d	GS1007-350	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6e	PN0005-L02	Anschlagdämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6g	SH0492-01	Kolben	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	-
7	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)			alle 6 Monate	36 Monaten
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
9	BR1009-L025	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
11	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	-