



Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/ remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
<b>Articulation modulaire</b>						
1	SB1069-L0960	boulon à goupille fendue	usure	usure	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0395-02	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
4	GS2611-040	rondelle de friction, $\varnothing = 14$ mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS2611-045					
4	GS2611-050					
4	GS2611-055					
4	GS2611-060					
5	SF0765-LJ/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	SF0765-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite			tous les 6 mois	36 mois
7	FE2966-01	ressort de pression, doré	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
8	SF0845-10	boulon	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
10	SC1405-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
11	SC1406-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)			tous les 6 mois	36 mois
<b>Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires</b>						
12	BR1211-L030	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
13	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
14	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	-