



Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle/ remplacement si nécessaire	Remplacement au plus tard
Articulation modulaire						
1	SB1069-L0960	boulon à goupille fendue	usure	usure	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0395-02	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
4	GS2611-040	rondelle de friction, Ø = 14 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS2611-045					
4	GS2611-050					
4	GS2611-055					
4	GS2611-060					
5	SH0665-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	SH0665-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite			tous les 6 mois	36 mois
6a	VE3771-09/15	joint torique pour la fixation de la vis de réglage sur orthèse	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6c	FE1027-01	ressort de pression	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6d	GS1108-500	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6e	VE3771-012/26	amortisseur à joint torique	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6g	SH0493-01	piston	usure	remplacer	tous les 6 mois	-
7	SC1405-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SC1406-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)			tous les 6 mois	36 mois
Étriers de pied modulaires, ancrs modulaires et montants modulaires						
9	BR1211-L030	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
11	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	-