



Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Überprüfung/ ggf. Austausch	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB1069-L0960	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0395-02	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
4	GS2611-040	Gleitscheibe, $\varnothing = 14$ mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS2611-045					
4	GS2611-050					
4	GS2611-055					
4	GS2611-060					
5	SF0665-AL	Deckplatte	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6a	VE3771-09/15	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6c	FE1027-01	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6d	GS1108-500	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6e	VE3771-012/26	O-Ring-Dämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6g	SH0493-01	Kolben	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	-
7	SC1405-L14	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1406-L14	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)			alle 6 Monate	36 Monaten
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
9	BR1211-L030	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
11	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	-