

# Der FIOR & GENTZ

# Orthesen-Konfigurator



Orthesen-  
Konfigurator



 Zukunftsweisendes Work-Sharing

**NEUE FUNKTION**

 Baustein für Ihre dokumentierte orthetische Versorgung

# IN 4 SCHRITTEN

## ZUR DOKUMENTIERTEN WUNSCHORTHESE

1

### Patientendaten

Im ersten Schritt geben Sie alle indikationsspezifischen Patientendaten an, die für die Planung Ihrer Orthese relevant sind. Versorgungskonzepte und Versorgungsformulare unterstützen Sie dabei.

Wir helfen Ihnen, die bestmögliche Orthese für Ihren Patienten zu planen.



2

### Orthesendesign und Systembauteile

Im zweiten Schritt erhalten Sie Vorschläge für das Orthesendesign und die Systemkomponenten. Die Vorschläge sind funktionell auf die Patientendaten abgestimmt und werden den zu erwartenden Belastungen gerecht.


Über die mit einem **i** gekennzeichneten Infobuttons erhalten Sie Fach- und Hintergrundwissen zu den einzelnen Abfragen, die Ihnen dabei helfen, die richtige Wahl zu treffen.

3

### Individuelle Anpassungen

Im dritten Schritt können Sie individuelle Anpassungen (z. B. zur Form und zum Material) vornehmen.

Mit dem Orthesen-Konfigurator erschaffen Sie eine vollständige Versorgungstransparenz für alle Beteiligten (Patient, Arzt, Therapeut, Kostenträger, Kollegen etc.), da die individuell geplante Orthese in allen Einzelheiten dokumentiert wird.

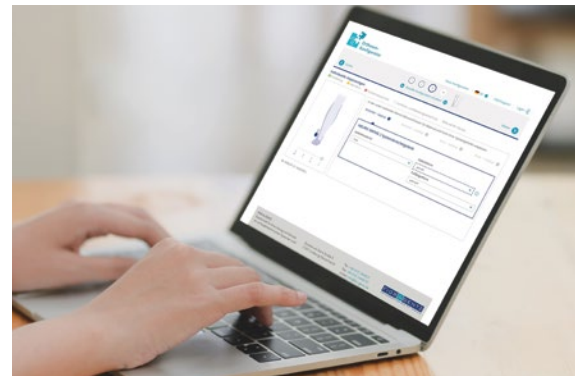

4

### Ergebnis

Hier können Sie Ihr Konfigurationsergebnis speichern, versenden und zur Versorgungsdokumentation ausdrucken. Ebenso können Sie sich eine Kalkulationsempfehlung erstellen lassen und die ausgewählten Produkte über unseren Webshop bestellen.

Mit dem Orthesen-Konfigurator können Sie eine reproduzierbare und dokumentierte Orthese erstellen – ein wichtiger Baustein für Ihre dokumentierte Versorgung.

# TUTORIAL- DOKUMENTATION

## NEUE FUNKTION

## ZUKUNFTSWEISENDES WORK-SHARING

Auch wenn ein ideales Szenario vorsähe, dass ein Orthopädie-techniker den gesamten Fertigungsprozess von der Planung der Orthese bis zu ihrer Übergabe begleitet, ist ein solches Vorgehen in der Realität nicht immer praktikabel. Mit der Online-Tutorial-Sammlung ist es möglich, dass mehrere Personen an einer Orthese arbeiten und jeder stets nachvollziehen kann, welche Arbeitsschritte der Mitarbeiter vor und nach ihm unternommen hat.



Hier ein möglicher Teilablauf:

Kollege 1 folgt den Arbeitsanweisungen zur Modelltechnik. Kollege 2 übernimmt die Herstellung der Orthese. Dann übergibt er zurück an den Kollegen, der die Planung erstellt hat und dieser folgt den Arbeitsanweisungen aus den Online-Tutorials zur Übergabe der Orthese. Er kann dem gesamten Team, das sich mit der Patientenversorgung befasst, auf diese Weise eine lückenlose Dokumentation der notwendigen Arbeitsschritte liefern.


Über das „Protokoll zur Überprüfung der Orthesenfunktion“ kann die Qualität der orthetischen Versorgung geprüft und dokumentiert werden.

## REPRODUZIERBARES SYSTEM DANK DOKUMENTATION

Die Online-Tutorial-Sammlung ermöglicht nicht nur eine effiziente Arbeitsteilung, sondern sorgt auch dafür, dass die finale Orthese reproduzierbar ist, da sämtliche Prozesse in der PDF-Datei dokumentiert sind. Sie können die Konfiguration mit Ihren Benutzerdaten jederzeit wieder aufrufen und die PDF-Datei neu generieren.



[www.orthesen-konfigurator.de](http://www.orthesen-konfigurator.de)

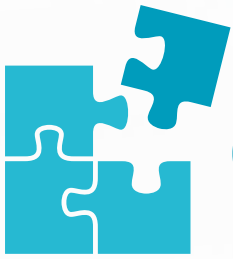

# Orthesen- Konfigurator



[www.orthesen-konfigurator.de](http://www.orthesen-konfigurator.de)

PR0267-DE-2020-08

**FIOR & GENTZ**  
Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg (Deutschland)

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ [info@fior-gentz.de](mailto:info@fior-gentz.de)  
🏠 [www.fior-gentz.de](http://www.fior-gentz.de)

**FIOR & GENTZ**  
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM