

Modularité des articulations de cheville modulaires


Certaines de nos articulations de cheville sont modulaires, ce qui permet de les transformer rapidement et facilement en remplaçant quelques-uns des composants modulaires et, le cas échéant, en limant l'étrier de pied modulaire. Dans ce tutoriel en ligne, nous vous présentons une vue d'ensemble des articulations de cheville modulaires et des étapes nécessaires pour leur transformation.

plug+go



Grâce à la modularité, il est possible de transformer les articulations de cheville modulaires NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-CLASSIC 2, NEURO SWING, NEURO SWING 2, NEURO VARIO-SWING et NEURO VARIO-SPRING 2 par substitution.

Elles se distinguent les unes des autres par leur plaque supérieure avec les unités à visser/mécanismes de ressort intégrés. Pour la transformation, il suffit d'interchanger la plaque supérieure avec les unités à visser/mécanismes de ressort intégrés. La technique de fabrication pour le renforcement de l'orthèse et le gabarit pour montage/stratification sont les mêmes.

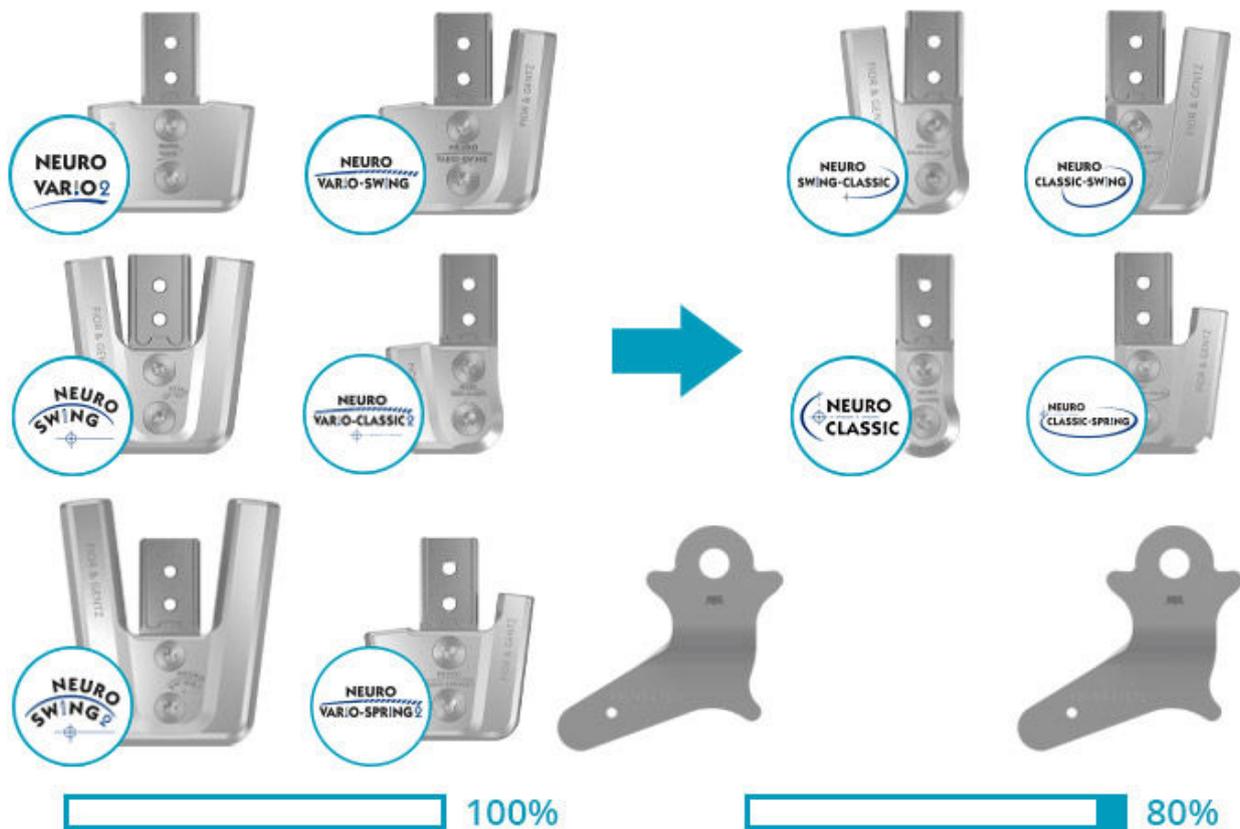


Les articulations de cheville modulaires avec modularité plug + go NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-CLASSIC 2, NEURO SWING, NEURO SWING 2, NEURO VARIO-SWING et NEURO VARIO-SPRING 2 peuvent être transformées en NEURO SWING-CLASSIC, NEURO CLASSIC-SWING, NEURO CLASSIC et NEURO CLASSIC-SPRING.

Elles se distinguent les unes des autres par leur plaque supérieure avec les unités à visser/mécanismes de ressort intégrés et par l'étrier de pied modulaire.

Pour la transformation, il suffit d'interchanger la plaque supérieure avec les unités à visser/mécanismes de ressort intégrés.

La technique de fabrication pour le renforcement de l'orthèse et le gabarit pour montage/stratification sont les mêmes.

Remarque : les articulations de cheville modulaires transformées n'ont pas les mêmes butées que les articulations modulaires NEURO SWING-CLASSIC, NEURO CLASSIC-SWING, NEURO CLASSIC et NEURO CLASSIC-SPRING d'origine, leur étrier de pied modulaire étant différent.

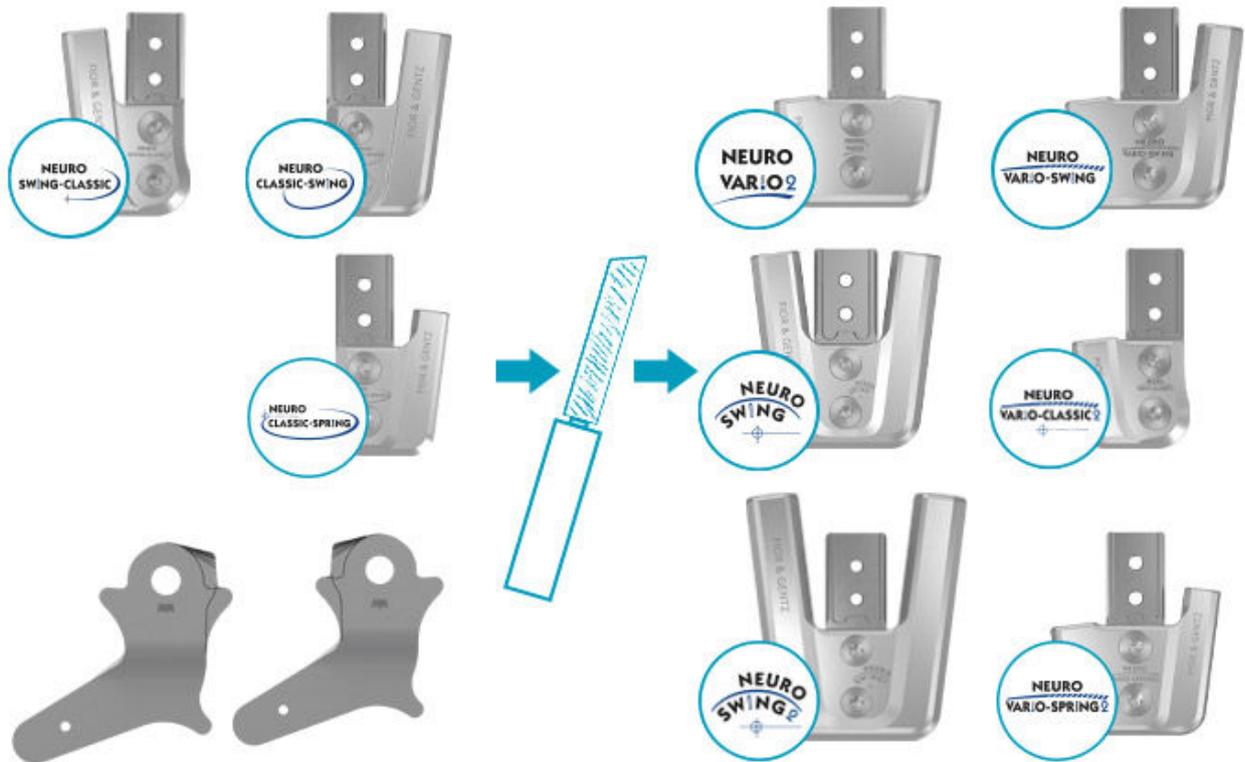

Les articulations de cheville modulaires NEURO SWING-CLASSIC, NEURO CLASSIC-SWING et NEURO CLASSIC-SPRING sont dotées d'une modularité plug + go partielle. Cela signifie qu'elles peuvent, après limage de l'étrier de pied modulaire, être transformées en articulations de cheville modulaires avec modularité plug + go NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-CLASSIC 2, NEURO SWING, NEURO SWING 2, NEURO VARIO-SWING et NEURO VARIO-SPRING 2.

Elles se distinguent les unes des autres par leur plaque supérieure avec les unités à visser/mécanismes de ressort intégrés et par l'étrier de pied modulaire.

Pour la transformation, il suffit d'interchanger la plaque supérieure avec les unités à visser/mécanismes de ressort intégrés et de limer l'étrier de pied modulaire.

La technique de fabrication pour le renforcement de l'orthèse et le gabarit pour montage/stratification sont les mêmes.



Pour le montage des articulations de cheville modulaires, reportez-vous au Montage des articulations de cheville articulations de cheville modulaires .